

Hernik

STARLIGHT **NXT**



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

2019. JÚLIUS

Tartalomjegyzék

I. Általános információk

1.1 Bevezetés 3

1.2 Cél és jelzés 3

1.3 Releváns információk 3

1.4 Megfelelőségi nyilatkozat 3

1.5 Jótállás 4

1.6 Szerviz és javítás 4

1.7 Gyakorlati utasítások 4

1.8 A jármű 3 pontos kábelkötegének használata (I. csoport) 4

1.9 A gyermek bekötése 6

1.10 A jármű hárompontos biztonsági övének használata (III. csoport) 7

II. Biztonsági utasítások 7

III. A fejtámla magasságának beállítása 8

IV. Az XL-Kit beszerelése 10

V. Az opcionális tartozékok használata 13

5.1 ISOFIX-adapter 13

5.2 Rögzítő ív 14

5.3 Biztonsági tálca 15

5.4 Oldalsó támaszok 15

5.5 Abdukciós blokk 16

5.6 Szögbeállítás 17

5.7 Lábtámasz / lábgörgő 17

5.8 Forgó adapter 17

VI. Jótállás 18

VII. Címkézés 19

VIII. Karbantartás és termékápolás 19

IX. Műszaki jellemzők 20

1.1 Bevezetés

Szeretnénk megköszönni a bizalmát, hogy Ön a "STARLIGHT-NXT" autósülést választotta, és ezzel egy kiváló minőségű termékre tett szert. Annak érdekében, hogy örömet lelje termékünkben, valamint, hogy az megkönnyítse a mindennapjait, bemutatjuk Önnek a helyes és egyszerű használatot, továbbá a szükséges ápolást és karbantartást. A felhasználói hibák okozta károk elkerülése végett, és a megfelelő használat érdekében, kérjük, olvassa el figyelmesen az alábbi utasításokat. Ha bármilyen kérdése vagy problémája van, kérjük, forduljon a márkakereskedőjéhez. Zavartalan használatot kívánunk Önnek, és reméljük, hogy termékeink megfelelnek az Ön elvárásainak. Fenntartjuk a jogot, hogy a jelen kézikönyvben leírt változaton technikai változtatásokat hajtsunk végre.

A gépkocsiba történő beszerelés és az első használat előtt kérjük, olvassa el és kövesse a 4-6. oldalon található beszerelési utasításokat.

Kérjük, gondoskodjon arról, hogy a használati utasítás a termékkel együtt maradjon, és így mindenki számára elérhető legyen, aki ezt használja.

Tisztelettel:

HERNIK GmbH

1.2 Cél és indikáció

A STARLIGHT-NXT-et a speciális szükségletű gyermekek gépkocsiban történő szállítására fejlesztették ki. A rossz fej- vagy törzskontrollal rendelkező gyermekek (pl. csecsemőkori cerebrális bénulás, izomdisztrófia, hipotónia) testtartását az egyénileg elhelyezett mellkasi párnákkal és a speciális kárpitozással lehet segíteni, amely biztosítja a biztonságos szállítását. Fontos opcionális tartozékok használhatók a speciális igények kielégítésére, mint például: az ülőszögek vagy egy stabil abdukciós ék, illetve lábzsámoly felszerelése.

További információkat az V. fejezetben.

1.3 Fontos információk

A STARLIGHT-NXT autósülés fogyatékkal élő gyermekek számára két modulból áll:

1. A Römer-Britax standard autósülés (lásd a gyártó használati útmutatóját).
2. Adaptációs modul tartozékokkal, amely lehetőséget nyújt az autósülés egyéni igényeknek megfelelő felszerelésére.

Kérjük, vegye figyelembe aHERNIK GmbH használati utasítását.

1.4 Megfelelőségi nyilatkozat

A HERNIK GmbH kizárólagos felelősséggel kijelenti, hogy a "STARLIGHT-NXT" autósülés megfelel az alapvető követelményeknek (93/42/EGK irányelv 1. függeléke). A termék a fent említett irányelv szerinti CE-jelöléssel van ellátva.

1.5 Jótállás

A jótállás csak akkor fogadható el, ha a terméket a megadott feltételek mellett és rendeltetésszerűen használják. A gyártó nem vállal felelősséget a gyártó által nem jóváhagyott alkatrészek és pótalkatrészek által okozott károkért.

1.6 Szerviz és javítás


A STARLIGHT-NXT szervizelését és javítását csak szakkereskedők végezhetik. Ha bármilyen probléma merül fel, forduljon a helyi kereskedőhöz. A javításhoz csak eredeti pótalkatrészek használhatóak!

1.7 Gyakorlati utasítások

Az autósülést teljesen összeszerelve szállítják. A kiszállításkor a kereskedő a kézikönyv segítségével tanítja meg a felhasználót a készülék használatára. A szakkereskedőnek a felhasználóval együtt kell az autósülést az autóba telepítenie, és ha rendelkezésre áll, be kell állítania az Isofix hevedert vagy a rögzítőt. Az autósülés beszerelésekor a legjobb, ha az egyik kezét az elülső rész közepén, a másikat pedig a tetején tartja. Az optimális üléspozíció elérése érdekében az autósülést egyénileg kell beállítani a gyermekhez igazítva. Ezt mindig a kereskedőnek kell elvégeznie.


1.8 A jármű hárompontos biztonsági övének használata (I. csoport)

Annak érdekében, hogy egy baleset során fellépő hatalmas erőket kezelni tudja, a STARLIGHT-NXT-ét a jármű hárompontos biztonsági övével kell rögzíteni az ECE 44/04 I., II. és III. csoportja szerint. Az ISOFIX csatlakozás önmagában nem elegendő!

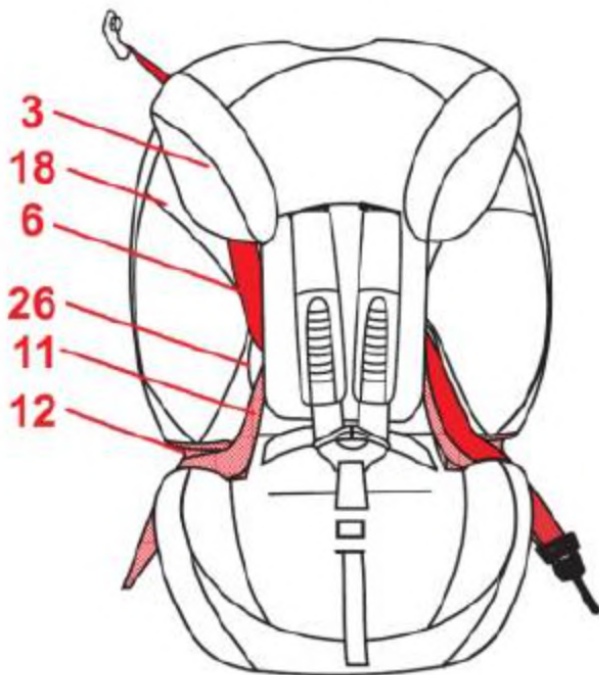


Az I. csoport szerinti rögzítés az ábrákon látható:

- Helyezze a medenceövet (11) a világos piros övvezetőkbe (12).
- Fogja meg együtt az átlós öv (6) és a medenceöv (11) kb. 80 cm-es részét.
- Vezesse át a biztonsági övet a háttámla első biztonsági övátvezető nyílásán (26).
- Fordítsa el a gyermekülést kissé az autósüléstől, majd vezesse a biztonsági övet hátrafelé a második biztonsági övátvezetőn (26) keresztül.
- Helyezze az átlós övet (6) és a medenceövet (11) az övvezetőkbe (12) az automata csat (10) oldalán. Húzza be a reteszt az autószatban (10). KATTANÁST kell hallania!

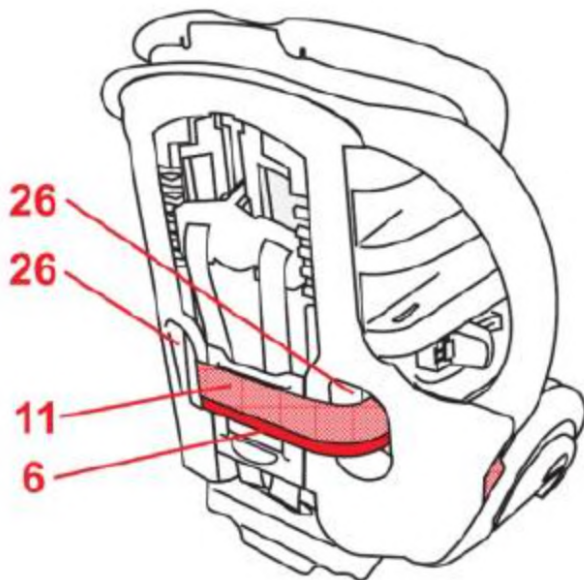

- Húzza meg az átlós övet (6) a biztonsági öv csatjának alján, hogy megfeszítse a medenceövet (11).
 - Miközben alulról tartja az átlós szíjat (6), húzza előre az átvezető nyíláshoz (26), hogy átfűzhesse a laza szíjat.
 - Ezután húzza meg erősen az átlós hevedert (6), hogy az egész hevedert megfeszítse.
- MEGJEGYZÉS: Elengedhetetlen, hogy a gépkocsi hátsó ülése és az utas háttámlája között legalább 60 cm távolság legyen!

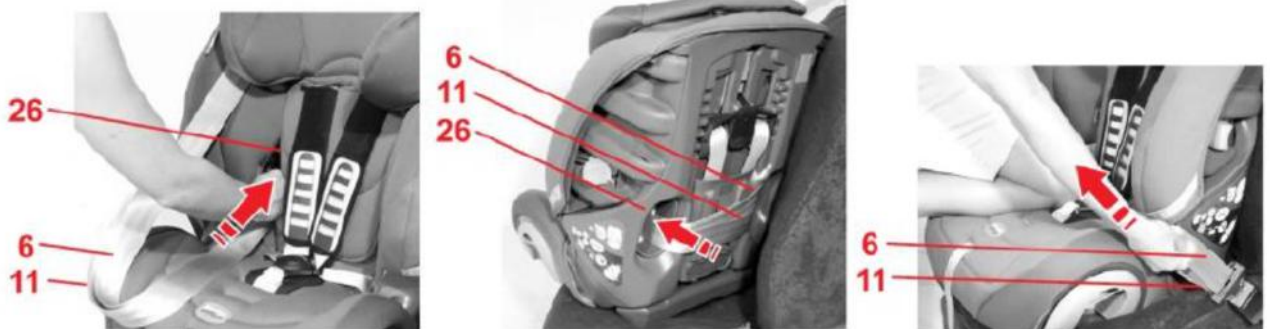

1.9 A gyermek bekötése

- Lazítsa meg a vállpántokat (2)
- Nyissa ki a csatot (15) a piros fülek megnyomásával.
- Tegye a gyermeket a gyermekülésbe.
- A vállpántokat (02) vezesse át gyermeke vállán.

Figyelem! Ne csavarja és ne cserélje fel a vállpántokat (2).

- Húzza össze a két reteszelőnyelvet (16), és hallhatóan kapcsolja be őket az övzárba (15). KATTANÁST kell hallania!
- Húzza meg a hevedereket, amíg azok szorosan illeszkednek gyermekének testéhez.




Figyelem! A csípőszíjaknak (25) a lehető legalacsonyabban kell futniuk a gyermek ágyéka felett.

Húzza meg a pántokat!

- Húzza meg a beállítóhevedereket (17), amíg a heveder egyenesen és szorosan gyermeke testéhez nem simul.

Figyelem! A beállítási hevedert (17) a lehető legegyszerűbben húzza ki, ne oldalra vagy felfelé.

- Húzza a vállpárnákat (14) ismét lefelé.
- Húzza meg a vállpántokat (2), hogy a derékpántok (25) feszesek legyenek, és a heveder egyenes legyen.
- Húzza meg ismét a beállítószíjat (17), amíg a heveder egyenesen és szorosan illeszkedik a gyermek testéhez.

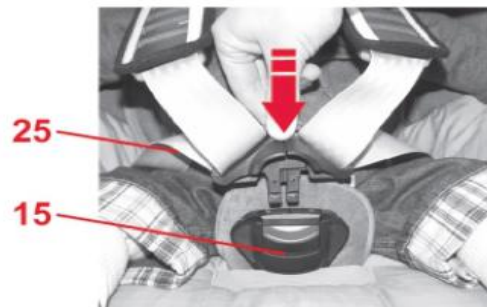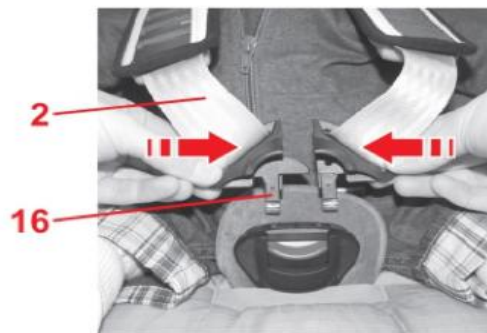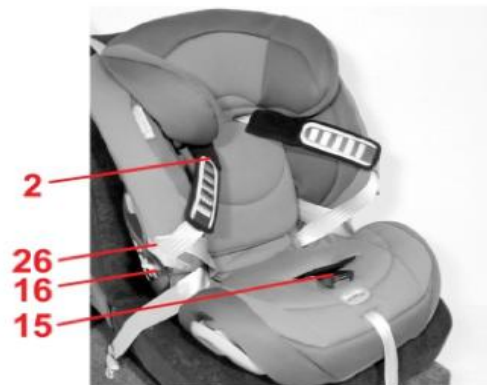

1.10 A jármű 3 pontos övének használata (III. csoport)

Ahhoz, hogy egy baleset során fellépő hatalmas erőket fel tudja venni, a STARLIGHT-NXT-t a jármű hárompontos biztonsági övével kell rögzíteni az ECE 44/04 I, II + III csoport szerint.


Az ISOFIX csatlakozás önmagában nem elegendő!
A III. csoportos rögzítést a következő képek mutatják:

- Helyezze a gyermekülést a jármű ülésére, és hagyja, hogy gyermeke beleüljön a gyermekülésbe.
- Húzza ki a biztonsági övet, és vezesse azt a gyermeke előtt lévő biztonsági övcsathoz (10).



Figyelem! Ne csavarja el az övet.

- A reteszt kapcsolja be az autó biztonsági övének csatjába (10). KATTANÁST kell hallania!
- Helyezze az átlós hevedert (6) és a medenceövet (11) az autócsat (10) oldalán a világospiros övvezetőbe (12).

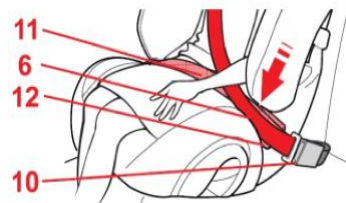


Figyelem! Az autó biztonsági övének csatja (10) nem fekdühet fel a világospiros övvezetőre (12).

- Helyezze a medenceövet (11) a másik oldalra a világospiros övvezetőbe (12).



Figyelem! A medenceövetnek (11) mindkét oldalon a lehető legalacsonyabban kell futnia a gyermek ágyéka felett.

- Helyezze be az átlós hevedert (6) a fejtámla (3) sötétpiros övtartójába (7), amíg az teljes hosszában feloldatlanul az övtartóba (7) nem kerül.
 - Ügyeljen arra, hogy az átlós heveder (6) gyermeke kulcscsontja felett haladjon, és ne érjen a nyakához.
- MEGJEGYZÉS: Ügyeljen arra, hogy az ülés és a jármű teteje között legalább 90 cm távolság legyen!

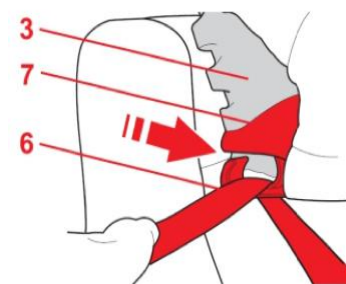

II. Biztonsági utasítások

- Használat előtt ellenőrizni kell az alkatrészek tökéletes működését és állapotát.
- A használati utasítást mindig a gyermekülés közelében kell tartani.
- Gyermeke biztonsága csak akkor garantált, ha az ülés helyesen van beszerelve és ha a gyermek pontosan rögzítve van.
- A hevedereket feszesen és csavarodás nélkül kell elhelyezni.
- A 3 pontos biztonsági övet a mellékelt övvezetőkön keresztül kell vezetni és szorosan körül kell ölelnie az ülést.

Kérjük, ellenőrizze:

- A) a biztonsági öv biztonságosan van-e elhelyezve az övvezetőben
- B) az övcsatok megfelelően záródtak-e.
- C) hogy nincs-e beakadva a textília.

- Győződjön meg arról, hogy a gyermek és a biztonsági öv közé nem kerülnek szilárd tárgyak, például pöckök, övcsatok stb. Ez baleset esetén sérülésekhez vezethet.
- Magyarázza el gyermekének, mennyire fontos, hogy jól legyen rögzítve, és hogy a hevederek futása ne változzon. A gyermeknek nem szabad meghúznia a hevedereket, és nem szabad kinyitnia az övcsatokat.
- Ne végezzen semmilyen változtatást az autósülésen, különben kockáztatja gyermeke biztonságát.
- Az autósülés nem sérülhet meg az autóban, vagy az ajtókon keresztül elmozduló alkatrészek által.
- Soha ne hagyja gyermekét egyedül az autós gyermekülésben.
- Tájékoztassa utasait arról, hogy gyermekét hogyan lehet kivenni az ülésből egy esetlegesen bekövetkező baleset után.
- Baleset után ki kell cserélni az autósülést.

III. A fejtámla magasságának beállítása

Húzza a reteszelő konzolt (1) óvatosan a az ülés háttámláján, amíg ki nem oldódik az ülés fogazatából. Mozgassa a fejtámlával együtt (2) a kívánt helyzetbe. Végül engedje ki a konzolt, hogy ismét be tudjon kapcsolódni - lásd az 1. ábrát.

1. ábra



FIGYELEM: Ha a rögzítő rúd már a legmagasabb ponton van, és még mindig nagyobb háttámla- vagy fejtámla-magasságra van szüksége, akkor az XL készletet kell utólagosan felszerelni, vagy nagyobb autósülést kell választani!

2. ábra

Ezután a kétrészes hátpárnát kell beállítani. Lazítsa meg az elülső hátpárna (4) és a mögötte lévő ék alakú egyensúlyozó párna (3) közötti karcokat - lásd a 2. ábrát.

Igazítsa a hátpárnákat (4), győződjön meg arról, hogy a csatlakoztatott fejtámlák megfelelően illeszkednek, és fordítsa vissza a párna alját az ék alakú párnák köré (3).

Győződjön meg arról, hogy nem képződnek ráncok, és egyenletes átmenet jön létre.



IV. Az XL-Kit felszerelése

Az XL-Kit lehetővé teszi, hogy a STARLIGHT-NXT-et nagyobb gyermekek is használhassák (max. 1,20 m). Ha az autósülés még nem az XL-kittel együtt lett megrendelve, akkor utólag is felszerelhető vele.

Az XL-készlet a következőkből áll:

1. háttámlapárna hosszú, fejpárnával együtt
2. övpárnák a vállhoz, párban
3. adapterlemez (mellkastámaszok használata esetén)
4. ék alakú párna, hosszú

- Először távolítsa el a már beszerelt hátpárnát, beleértve az ék alakú kompenzációs párnát is.

- Lazítsa meg a hevedereket, amennyire csak lehetséges, és vegye le a szürke hevedereket az Y-csatlakozóról (2. ábra).

Nyomja meg a kioldógombot (3. ábra), és húzza felfelé az autósülés hátulján lévő Y-csatlakozót, ameddig csak lehet - amíg a szürke 25 mm-es pánt meg nem áll, és csak néhány centimétert látszik.

Tartozékok




2. ábra



3. ábra




4. ábra

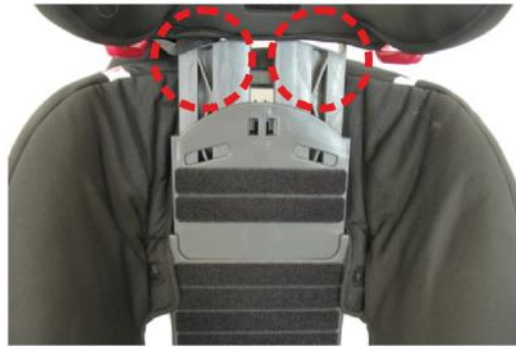

Vezesse át az övpárna hevedervégeit (1) a fejtámla alatti nyílásokon (4. és 5. ábra), és akassza be őket az Y-csatlakozó részbe. Az Y-csatlakozó (2) az 5. ábrán látható módon a helyén marad.

5. ábra

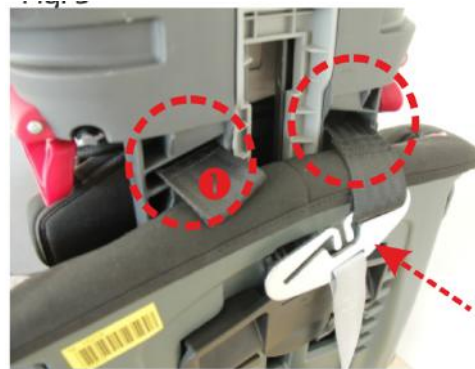

FIGYELEM: az ülés elején lévő 25 mm-es heveder már nem rendelkezik funkcióval. Kérjük, ne húzza tovább!

A korábban eltávolított szürke pántokat most helyesen kell behelyezni a két állítóelembe - lásd a 6. ábrát. Kérjük, vegye figyelembe a nyilak irányát!

6. ábra



A vállpánt hossza ezután a két állítógomb segítségével változtatható, amelyek az övpárnák végén találhatóak. A meghúzás a hevedervégek meghúzásával történik. A lazításhoz nyomja le a szürke gombot az állítóról és húzza meg a vállpántot. Az övnek könnyen, túlzott erőfeszítés nélkül mozgathatónak kell lennie. Ha ez nem így van, akkor az öv rosszul lett befűzve!

7. ábra



Ha a mellkastámaszokat beszerelték, akkor az adapterlemezt (3) most kell felszerelni - lásd a 7. ábrát. Ehhez a fejtámlát teljesen ki kell húzni, és két csík öntapadós hurokszalagot (a csomagban található, az adapterlemezre

ragasztva) kell a pirosan jelölt területre ragasztani.

Következő lépésként a mellkastámaszok már meglévő rögzítőlemezét (5) (négyzet alakú lemez, kb. 20 x 20 cm) el kell távolítani az ülés háttámlájáról, és az imént felszerelt adapterlemez magasságában kell rögzíteni - lásd a 8. ábrát.

Most már célszerű a mellkastámaszt (6) is beállítani a gyermeknek megfelelő magasságra - feltéve, hogy előzőleg elvégezte a méréseket.

Függetlenül attól, hogy a mellkastámaszok be vannak-e szerelve vagy sem, a hosszú ék alakú párnát (4) most kell a hát alsó széléhez rögzíteni - lásd a 9. ábrát.

Az utolsó lépés a hosszú hátpárna (1) felszerelése, beleértve a fejtámla elhelyezését is. A mellkastámaszokat vezesse át a megfelelő hosszanti nyílásokon, majd a felesleges párnát tekerje az ék alakú párna (4) köré. Ügyeljen arra, hogy ne gyűrődjön.

A fejtámla magassága ezután a kívánt magasságra állítható a szürke kar (7) segítségével.



8. ábra



9. ábra




V. Az opcionális tartozékok használata

5.1 Isofix-adapter

Felszerelés:

1. Hagyja, hogy a szakértő bemutassa Önnek az ülés beszerelését és beállítását.
2. Nyissa ki a bal és jobb oldali állítócsavarokat (1), és húzza ki a konzolt hátrafelé.
3. Állítsa be a kívánt szögbe az autó ülésének háttámláját, kihasználva az autó háttámlájához kialakított helyet. Csúsztassa az ISOFIX adaptert mindkét oldalon hátrafelé a háttámla irányába, amíg nem hallja a két ISOFIX nyelv (2) rögzítését a jármű ISOFIX rögzítésében (két kattanas).
4. Nyomja az autósülést a jármű háttámlája felé, amíg mindkettő össze nem ér, és enyhén megfeszül. Ez megakadályozza a vezetés közbeni rezgéseket.
5. Zárja be a két állítócsavart (1) balra és jobbra. Ezenkívül a két ISOFIX-nyelvnek védve kell lennie az önkéntelen kinyílástól, ezért mindkét csavart (3) meg kell húzni.
6. Győződjön meg arról, hogy mindkét ISOFIX nyelv be van-e kapcsolva egy kétoldali húzási próbával.

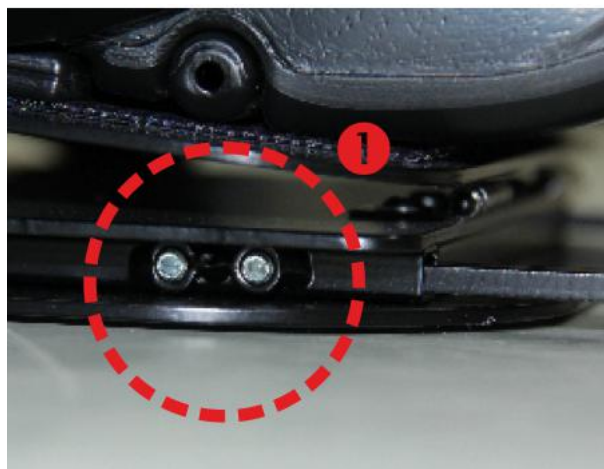

Eltávolítási sorrend:


1. Nyissa ki a két csavart (3).
2. Mozdassa őket előre az autósülés irányába, és oldja ki a rendszer rácsos csatlakozását. Előfordulhat, hogy az ülések párnázásának nyomását ki kell egyenlíteni, hogy a csatlakozás megoldható legyen.
3. Az autósülés most már eltávolítható a járműből.



5.2 Rögzítő ív

Felszerelés:

1. Az ülés beszerelését és beállítását a szállítás során mutassák meg Önnek.
2. Nyissa ki a bal és jobb oldali állítócsavarokat (1), és húzza a konzolt hátrafelé.
3. Állítsa be az autó ülésének háttámláját a kívánt szögbe, kihasználva az autó háttámlájához kialakított helyet. Ezután tolja a bilincset mindkét oldalon hátrafelé a háttámla irányába, amíg az be nem süllyed az autó ülésének és az üléskárpitnak a részébe, és szilárdan meg nem áll.
4. Nyomja az autósülést a jármű háttámlájához, amíg laposan nem fekszik.
5. Most zárja be a két állítócsavart (1) a balra és jobbra.
6. Az, hogy az ív eltolásának felfelé vagy lefelé kell-e irányulnia, az

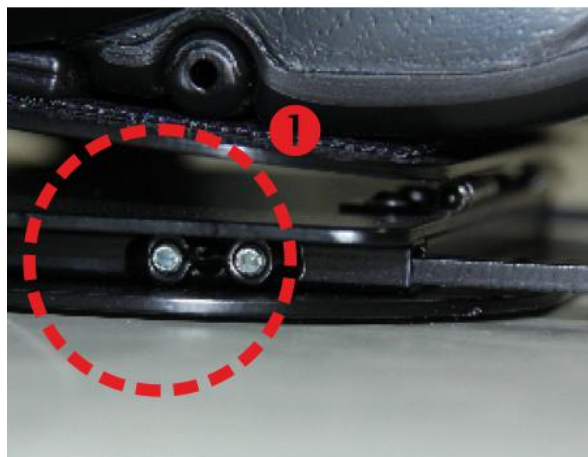

adott személygépkocsi-ülés kialakításától függ.

Eltávolítási sorrend:

1. Húzza ki az autósülést a rögzítővel együtt az autósülés réséből.

5.3 Biztonsági tálca

1. Az ülés beszerelését és beállítását a szállítás során mutassák meg Önnek.
2. Helyezze a támasztékot és a biztonsági párnát (1) az autósülésre, miután gyermekét beleültette és bekötötte.
3. Rögzítse a párnát a mellékelt tépőzáras pántokkal (2), amelyek az autósülés hátulján vannak rögzítve.
4. Gyermeke karjainak az asztalon kell nyugodniuk, ami függőleges ülés helyzetet eredményez. Ez megtámasztja a felsőtestet.
5. Ügyeljen arra, hogy ne legyenek játékok a kárpiton. Ne használjon kemény, szilárd vagy akár éles szélű tárgyakat!



5.4 Oldalsó támaszok

1. A HERNIK GmbH a STARLIGHT-NXT készüléket nem szabad megbontani (fúrni, csavarozni). Ennek ellenére nagyon fontos volt számunkra, hogy oldalirányú támasztékot (1) kínáljunk a gyenge törzsizmokkal rendelkező gyermekek számára, ezért olyan rögzítési megoldás mellett döntöttünk, amely tépőzárral megfelelő stabilitást és rugalmasságot is biztosít.



2. A párnák helyzetének megváltoztatásához először ki kell oldani a tépőzáras csatlakozást annak óvatosan elforgatásával. Ezt követően a párna szabadon elrendezhető.

FONTOS: A stabil illeszkedés érdekében a párnát nagy nyomással kell nyomni, miközben előre-hátra forgatja a STARLIGHT-NXT hátulján. Ez a tépőzáras elemek szilárdabb tartását eredményezi!

5.5 Abdukciós gát

1. Az abdukciós ék (2) segít a gyermeknek, hogy elérjen egy előre meghatározott távolságot a térdei között. Az 5 pontos öv lazításához vagy meghúzásához az éket el kell távolítani. Nyissa ki a bilincset (1), és vegye ki az éket felfelé.
2. Az éknek a képen látható módon az ülés kárpitjához kell érnie. Az ék mélysége állítható. Ehhez mindkét hatszögletű csavart ki kell nyitni és az ülés alá kell eltolni.
3. Az éket mindig vezetés közben kell használni (ha azt az opcióként választja), különben gyermeke megsérülhet a felszerelés miatt.
4. A kar (1) helyzetét a csavarkötés elmozdítása nélkül, óvatosan előre húzva lehet megváltoztatni. Ügyeljen arra, hogy felfelé álljon, és ne legyen útban, különben a gyermek vádlija érintkezhet vele.




Megjegyzés: Az abdukciós gát csak 16 kg feletti gyermekeknél használható, mivel a kisebb gyermekek egy baleset során megsérülhetnek.

5.6 Szög beállítása

1. Ha a jármű ülés által biztosított ülésszög nem elegendő, az autósülés ülésszöge a (meghosszabbított) gyermekülés szögbeállításával (1) növelhető. Ehhez a bal és jobb oldali csavart (2) ki kell nyitni, és egy másik furatot kell kiválasztani. Ezután húzza vissza a csavarokat.

2. Biztonsági okokból itt nem lehetséges gyorskioldás!

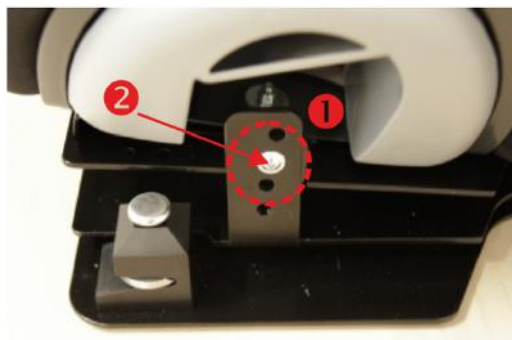


5.7 Lábtartó / lábtámasz

1. A fület (1) az autósülés alatt rögzítik az alaptartozékon lévő állítócsavarokkal, így a mélység állítható.

2. A kapaszkodók szöge a gyorskioldókar (2) kinyitásával változtatható. Ügyelni kell arra, hogy a karok olyan helyzetben legyenek, hogy ne okozzanak sérülést!

3. A lábtartó magasságának beállításához a bal és jobb oldali csavarokat kell kinyitni. Így fokozatmentesen lehet a magasságot beállítani. Ezután kérjük, húzza meg ismét a csavarokat.

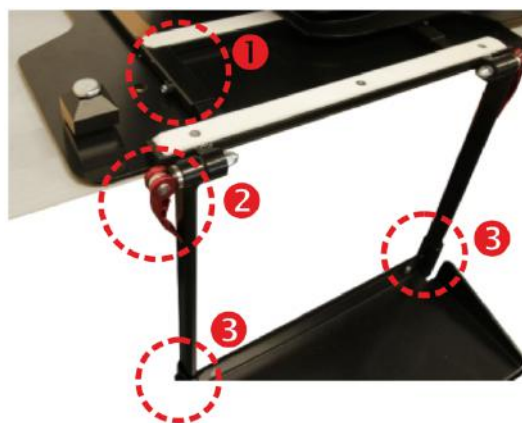

5.8 Forgó adapter

1. A járműbe való mindennapos ki- és beszállás megkönnyítése érdekében ajánljuk forgó adapterünket, amely lehetővé teszi, hogy az autósülés 90°-kal kifelé forduljon. Műszaki okokból csak EGY forgásirány lehetséges. A másik irányba történő későbbi változtatáshoz az autósülést a gyártónál szükséges átépíteni. Az



ISOFIX adapterek vagy a bilincs használata ajánlott!

2. A szék elfordításához a fogantyút (1) egyidejűleg kell felfelé húzni és a széket mozgatni. Az opcionális lábtartó megáll, hogy elkerülje az ütközést az első utasüléssel és a B-oszloppal.

Ügyeljen gyermeke lábára, amikor forgatja!

3. Az áthelyezés után egyszerűen fordítsa vissza az IPAI-NXT-et a kiindulási helyzetbe, és figyeljen a "kattanó" hangra, amikor a nyelv (2) visszacsapódik a reteszbe.



VI. Jótállás

A Hernik termékeket szigorú minőségi előírásoknak megfelelően tervezik és gyártják. Ha kivételes körülmények között panaszra van oka, a Hernik GmbH a szállítási feltételeknek megfelelően garanciát vállal:

- 24 hónap garancia minden szilárd alkatrészre, a szállítás időpontjától számítva.
- 12 hónap garancia minden mozgó alkatrészre, a szállítás időpontjától számítva.

A nem a Hernik GMBH által gyártott alkatrészekre vonatkozóan kérjük, olvassa el az adott gyártó (Römer-Britax Kindersicherheit GmbH) garanciális szabályzatát. A garanciális igények érvényesítésének feltétele, hogy a készüléket megfelelően telepítették és a mellékelt használati utasításoknak megfelelően használták.

A jótállás érvényét veszti, ha a gyártóval való előzetes egyeztetés nélkül módosításokat vagy szakszerűtlen javításokat végeznek.

A garancia érvényét veszti, ha a készüléket nem megfelelően szerelték be.

További, bármilyen jogi okból eredő igények, különösen a közvetlen vagy közvetett károkozásra vonatkozó igények kizártak.


VII. Címkézés

A hátoldalon az alábbi feliratokat találja:



VIII. Karbantartás és termékápolás

1. Nyolc hetente ellenőrizze a csavarkötések erősségét, és szükség esetén húzza meg újra.
2. Rendszeresen tisztítsa meg száraz ruhával; ha erősen szennyezett, tisztítsa meg kíméletes háztartási tisztítószerrel.
3. Vegye le a fedelet:
 - Nyissa ki a tépőzárát az ágyékbetéten (23), és vegye le.
 - Nyissa ki a háttámla borítás (29) és a fejtámla (3) bal és jobb oldalán lévő nyomógombokat (5).
 - Csatlakoztassa ki a gyermekülés széle alatt lévő referenciaéleket és a gumihurkokat.
 - Vegye le a fejtámla fedelét (03).
 - Tolja ki az övzárát (15) a fedélből.
 - Csatlakoztassa ki a fedél gumikanyarulatait a pohártartótól (4).

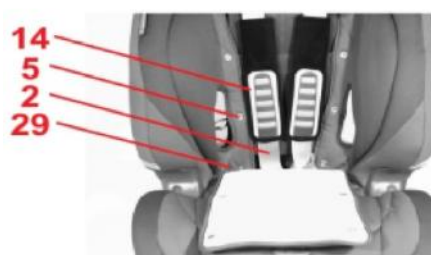

IX. Műszaki jellemzők

	STARLIGH NXT standard	STARLIGH NXT XL Kit
ÜLÉS SZÉLESSÉG (medencénél)	30 cm	30 cm
ÜLÉS SZÉLESSÉG (térdnél)	35 cm	35 cm
ÜLÉS MÉLYSÉG	26 cm	32 cm
HÁTTÁMLA MAGASSÁG	27-39 cm	44-53 cm
KORONA MAGASSÁG	51-62 cm	67-76 cm
OLDALIRÁNYÚ MAGASSÁGI	17-27 cm	25-38 cm
OLDALSÓ TÁVOLSÁG	14-19 cm	
szög	90'	
teljes magasság	60-85 cm	
teljes szélesség	50 cm	
teljes mélység	53 cm	
súly	8.5 kg (tartozékok nélkül)	
kapacitás	9-36 kg	

Alapfelszereltség

- 5 pontos heveder párnázott csatpárnával (állítható magasságúak) és övprotektorokkal
- Állítható magasságú fejtámla
- Különleges szellőzőrendszer
- Kétrészes háttámla a nagy kényelem érdekében és párnázott fejtámla (30 °C-on mosható)
- Oldalütközés elleni védelem a nagy lengéscsillapítónak köszönhetően
- Pohártartó mindkét oldalon